



Farbwahl

Die Zahntechnik Trachsler AG ist innovativ, auch was die Farbwahl betrifft. Gerne unterstützen wir Sie um möglichst natürliche Resultate zu bekommen.

Das Auge

Nichts ist genauer und besser als das geschulte Auge, unsere Keramiker sind Spezialisten beim Umsetzen der Farbwahl in unsere Versorgungen.

Natürlich sind viele Faktoren die dieses Umsetzen beeinflussen.

- Wichtig ist:
- > Wenn möglich am Fenster
 - > Immer am gleichen Ort, unterstützt durch Digitalkamera oder Handy

Wir kommen gerne in die Praxis (kleiner Aufpreis) oder empfangen den Patienten im Labor, was am optimalsten ist.

Spectro Shade

Farbnahme und objektive Betrachtung der Zahnfarbe, natürlich oder künstlich, in allen Lichtverhältnissen

Vor- und Nachteile


- ✔ Eine sichere und schnelle Farbanalyse
- ✔ Eine sichere Farbanalyse bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
- ✔ Eine sichere Übermittlung der Farbanalyse in die Patientenakte oder ins Labor mit USB, W-LAN, SD-Card oder Mail
- ✔ Vergleichsmessungen z.B. vor oder nach dem Bleachen
- ✘ Aufwendiger als Fotografieren
- ✘ Mundstück bisschen unangenehm für den Patienten

Wie es funktioniert

- Mit einem einfachen Anklicken erkennt der Spectro Shade die wirkliche Farbe der Zähne, wertet sie mit einem Spektrophotometer aus und zeigt den für die Zahnerneuerung verfügbaren Farbton mit bestmöglicher Übereinstimmung an.

Ergebnisse

- Spectro Shade zeigt eine Gesamtbeurteilung der Zahnfarbe, eine in drei Bereiche unterteilte Beurteilung: Zahnhals, Mitte, Schneide und eine detaillierte Analyse an jedem Punkt.
- Auch die Transluzenz kann sichtbar gemacht werden

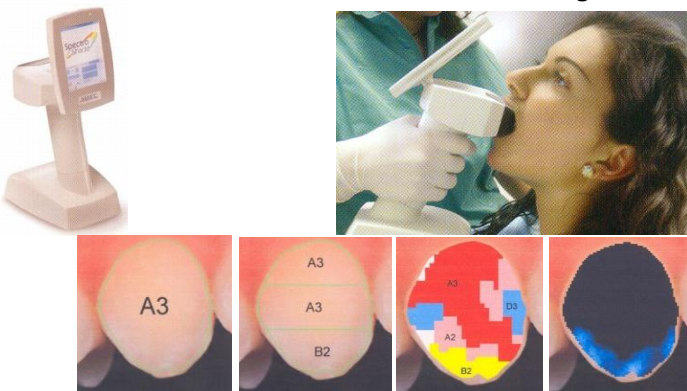

Digitalkamera

Zur Unterstützung der Farbwahl von Auge. Verwenden wir eine Digitalkamera

Vor- und Nachteile

- ✔ Einfach und schnell
- ✔ Einfache Übermittlung per mail
- ✔ Einstellungen werden von der ESS Zahntechnik AG erläutert
- ✘ Keine Farbtreue, es braucht immer die Farbwahl von Auge

Wie es funktioniert

- Nehmen Sie mehrere Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln auf (Spiegeln)
- Halten Sie das bestmögliche Farbmuster des Farbringes daneben
- Achten Sie, dass auch die Bezeichnung des Farbmusters sichtbar ist

Möglichkeit

- Verfügen Sie über keine Digitalkamera ist auch ein Handy nützlich, wenn auch nicht optimal, aber immer noch eine willkommene Unterstützung



Interesse oder Fragen? Kontaktieren Sie uns:

Zahntechnik Trachsler AG / Seestrasse 276 / 8700 Küsnacht / Tel: +41 44 910 67 79 /

Mail: info@zahntechniktrachsler.ch