



## Michigan Schienen

### Ist eine Therapie-Schiene!

#### Wichtig sind folgende Merkmale:

- Jeder Antagonist braucht mit einem oder mehreren Höckerspitzen Kontakt
- Es darf keine Einbisse haben
- Es braucht ca. 1mm Freedom in Zentric (Seitbewegung in einer Ebene)
- Nach 1mm Seitbewegung kommt eine klare Eckzahnführung zum tragen
- Die Protrusion (Vorbissbewegung) führt mit Seit- und Frontzähnen

#### Weshalb eine so exakte Schiene?

Die durch das Okklusionsrelief gefangenen Zahnreihen verkeilen sich beim starken Zusammenbeißen, dadurch werden die Kontaktpunkte eingeschliffen, die Zähne flachen ab und zerstören sich selbst. Dazu kommt eine Verspannung der Muskulatur, die sich durch Muskelschmerzen oder Kopfschmerzen äussert.

Durch die horizontalen Flächen der Michigan-Schiene «rutschen» die Zähne «aus».

Die Muskulatur löst sich von allein.

Durch die Eckzahnführung wird die Seitbewegung «natürlich» gebremst.

Auch die Gelenke werden durch die leicht geöffnete Position der Kiefer entlastet.

Diese Position kann gezielt in der Michiganschiene eingestellt werden, braucht aber eine exakte Bissnahme und einen Gesichtsbogen, um die Position der Zähne zum Gelenk zu fixieren.

Nur ausgewählte Labore mit erfahrenen Technikern sollten sich der Michigan-Schienen Herstellung annehmen, um den Patienten einen dauerhaften Erfolg zu garantieren.

Wir freuen uns Ihnen helfen zu können, für schmerzfreie, erholsame Nächte.



Neu:

Jetzt auch in green und freez erhältlich!



#### Interesse oder Fragen?

Kontaktieren Sie uns in **Küsnacht** +41 44 910 67 79